

素・敵・に・見・え・る
メガネ1番

顔型にあったメガネ選び②

～お顔の形4タイプ～




似合うメガネを選ぶ条件は、まず自分の顔の特徴を知ることです。人の顔のイメージは4つに分かれ、「長い」か「短い」か、また「ほっそり」か「ふっくら」かにより似合うフレームのカタチが違ってきます。今回はそれぞれのタイプに合うフレームとフレームカラーをアドバイスします。

(このシリーズは毎月第2木曜日にお送りします。過去の記事はメガネ一番のホームページをご参照ください)



point

- フレーム**
- ・タテ幅が比較的広いもの
 - ・直線的なデザイン
- フレームカラー**
- ・収縮して見える色

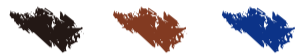

[長くてふっくら]

長くふっくらした顔を小さくシャープに見せるには、タテ幅が広く、太い直線的な作りのフレームを選びましょう。色は引き締め効果のあるブラックやブラウンなどダークカラーが良いです。

長い



point

- フレーム**
- ・タテ幅が比較的広いもの
 - ・曲線的なデザイン
- フレームカラー**
- ・膨張して見える色



[長くてほっそり]

面長の方は、顔の長さを感じさせないよう全体にタテ幅のあるフレームがベスト。丸みを帯びたデザインで、色は肌色に近いピンクやベージュ系を選ぶとふっくら柔らかな印象を与えてくれます。

ふっくら



point

- フレーム**
- ・タテ幅が比較的狭いタイプ
 - ・直線的なデザイン、フレーム上部にポイントのあるタイプ
- フレームカラー**
- ・収縮して見える色



[短くてふっくら]

顔の丸さをカバーするには、下フチのないナイロールか、タテ幅のあまりないフレームがオススメ。また、角のあるタイプや直線ラインを含むフレームはシャープさを演出します。色は濃いほどすっきりした印象になります。

ほっそり



point

- フレーム**
- ・タテ幅が比較的狭いタイプ
 - ・曲線的で細いリム(レンズ縁)のデザイン
- フレームカラー**
- ・明るく淡い色



[短くてほっそり]

小作りな顔には、そのサイズにピッタリなタテ幅の狭いフレームが良いです。顔の線を邪魔しない細く曲線的なフレームを選び、すっきりさりげなく見せましょう。ピンクや明るい紫など肌のトーンに近い色で柔らかなイメージに。

短い

教えて

メガネのお手入れ方法

Q レンズにゴミやほこりが付着しているときは？

水洗いをティッシュペーパーで水気を取ったら、レンズ専用メガネふきで軽くふいてください。

❗ **注意** 乾ぶきはゴミやほこりで傷つけてしまうので避けましょう。

Q 正しいふき方は？

ふく方の外側を持って、レンズ専用メガネふきでそっとふきます。反対側を持ったり、力を入れすぎると破損することがあります。



Q ひどい汚れを落とすときは？

薄めた中性洗剤をつけ、指の腹でやさしく洗います。メガネ一番全店に設置してある超音波洗浄器での洗浄(サービス)もオススメ。フレームとレンズの間にある自身ではふきとれない汚れを取り除くことができます。

❗ **注意** お湯で洗ったり、ハンドソープなどの石けんを使ったりすると、レンズのコート膜がはがれる原因となるので気を付けましょう。スポンジで洗うのも×です。



今月のアドバイザー

國場はるかさん

一般的に理想の顔型は卵型です。メガネ選び一つで「顔型補正効果」が得られ、理想の形に近づけられます。

メガネ一番小祿店 ☎098(858)5353 <http://www.megane1ban.com/>

メガネファッションコンサルタント

小祿店

新都心店



國場 はるか

知念 美香

仲嶺 望

国吉美樹

石嶺 千春

西原シティ店

中の町店

美里店



新田 純子

伊良皆 和美

宮城 早苗

伊良皆 浩美

知名 美智子